

- ⚠ Bedinungsanleitung zerlegbare Laminektomie-Stanzen
  - ⚠ *Instructions for use detachable Laminectomy Punches*
- REF 06-11-9xx, 06-61-9xx, 06-81-xxx




## Demontage / *Disassembly*



Stanze schließen und Auslöseknopf ziehen.

*Close the punch and pull the release button.*

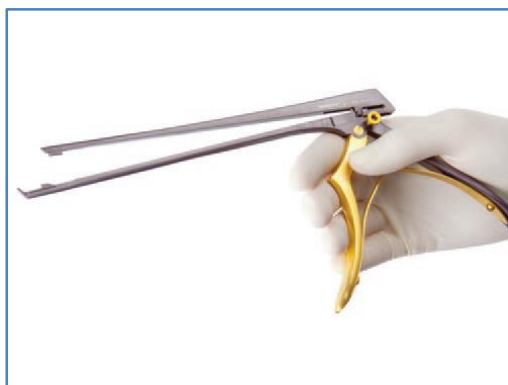

Stanze öffnen und Schieber nach oben klappen. Die Stanze ist zerlegt. Alle Teile bleiben miteinander verbunden.

*Open the punch and lift the sliding part up. The punch is disassembled. All parts remain connected with each other.*

## Montage / Assembly



Schieber in Führung am Hauptteil einsetzen.

*Insert the sliding part in the guiding of the main part.*




Stanze schließen und gleichzeitig Schieber nach vorne bewegen. Die Stanze ist montiert und einsatzbereit.

*Close the punch and push the sliding part to the front. The punch is assembled and ready for use.*

⚠ Die Stanze lässt sich nur bei gezogenem Entriegelungsknopf zusammenfügen. Im Zweifelsfall Entriegelungsknopf bei geschlossener Stanze nochmals ziehen.

⚠ *The punch can only be closed when the release knob has been unfixed. In case of any doubt please pull the release knob of the closed punch once again*

 REBSTOCK INSTRUMENTS GMBH  
In Weiheräcker 7  
78589 Dürbheim  
Deutschland / Germany

Tel.: +49 (0) 7424-98230 30  
Fax: +49 (0)7424-98230 50  
Email: [Info@rebstock.de](mailto:Info@rebstock.de)  
[www.rebstock.de](http://www.rebstock.de)